

Analyse af gener relevante ved mistanke om familiære interstitielle lungesygdomme

Panelbeskrivelse

Navn: Analyse af gener relevante ved mistanke om familiære interstitielle lungesygdomme

Antal gener: 38

version: 1.0

Ibrugtagningsdato: 2025-10-10

Metodebeskrivelse: Prøveforberedelse og sekventering: Der udføres helgenomsekventering (WGS) med Illumina PCR free library prep (tagmentation) og Illumina sekventering (NovaSeq). Middelsekventeringsdybden for analysen er minimum 30X og minimumsandelen af genomet, der er dækket minimum 15X, er 95 %. Middelsekventeringsdybden og andelen, der i gennemsnit er dækket minimum 15X, for de enkelte gener kan ses i nedenstående tabel.

Dataanalyse: Referencegenom: hg38. Alignment og variantkald foretages med hhv. BWA og GATK. Data analyseres for strukturelle varianter vha. Manta og GATK-gCNV. Der foretages *in silico* filtrering af data til relevante genregioner baseret på nedenstående tabel. Varianter med allelfrekvens mindre end 15% filtreres som udgangspunkt fra. For de anførte gener undersøges der for varianter i de proteinkodende regioner og de nærmeste 10 bp i de tilstødende ikke-proteinkodende regioner, samt varianter i ikke-proteinkodende regioner indberettet som sandsynlig patogene (C4) eller patogene (C5) i ClinVar. Varianter klassificeres iht. ACMGs klassifikationsguideline (PMID: 25741868), og hvis tilgængelig og relevant benyttes ClinGens genspecifikke guideline. Varianter af ukendt klinisk betydning (C3) anføres kun i svaret, hvis de vurderes relevante i forhold til sygdomsbilledet. Anlægsbærerstatus for recessiv sygdom rapporteres ikke nødvendigvis. Genomsekventering er en screeningsmetode, og ikke alle varianter kan med sikkerhed identificeres. Den udførte analyse har ikke samme sensitivitet som DNA-microarrayanalyse ift. strukturelle varianter.

Genliste

Gener, hvor middelsekventeringsdybden er < 30X, er markeret med¹. Gener, hvor andelen af de kodede regioner, der dækket minimum 15X, er < 95 % er markeret med². Gener, der derudover vides at være suboptimalt dækket, er markeret med³. Værdier er angivet med +/- standardafvigelse.

Gen	Middelsekventeringsdybde [x]	Andel >= 15x [%]	Andel >= 20x [%]	Andel >= 30x [%]
ABCA3	51.98 +/- 8.4	100.0 +/- 0.0	99.91 +/- 0.48	97.97 +/- 6.15
ACD	47.59 +/- 8.19	100.0 +/- 0.0	99.87 +/- 0.64	96.66 +/- 8.72
AP3B1	55.41 +/- 7.43	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.03	99.47 +/- 1.56
ASAH1	55.58 +/- 7.86	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.73 +/- 0.81
CASR	51.5 +/- 7.85	99.99 +/- 0.09	99.66 +/- 0.5	97.56 +/- 3.22
CSF2RA	53.64 +/- 7.56	100.0 +/- 0.0	99.96 +/- 0.25	99.14 +/- 2.59
CSF2RB	51.16 +/- 7.93	100.0 +/- 0.0	99.97 +/- 0.22	97.92 +/- 6.99
CTC1	50.95 +/- 7.99	100.0 +/- 0.0	99.94 +/- 0.24	98.52 +/- 4.55
DKC1	42.52 +/- 16.09	99.94 +/- 0.32	93.3 +/- 13.12	69.97 +/- 35.49
FAM111B	54.95 +/- 7.9	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.7 +/- 0.71
FARSA	52.15 +/- 8.09	100.0 +/- 0.0	99.9 +/- 0.7	98.75 +/- 4.9
FARSB	54.99 +/- 7.61	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.58 +/- 0.95
GBA1^{2,3}	39.15 +/- 6.24	82.96 +/- 3.33	74.54 +/- 2.97	70.82 +/- 3.62
HPS1	52.53 +/- 8.78	100.0 +/- 0.0	99.95 +/- 0.34	98.62 +/- 4.65
HPS4	53.6 +/- 8.12	99.96 +/- 0.06	99.86 +/- 0.13	98.79 +/- 3.14
ITGA3	49.19 +/- 8.16	100.0 +/- 0.0	99.96 +/- 0.24	97.22 +/- 6.6
NAF1	49.17 +/- 6.93	100.0 +/- 0.0	99.23 +/- 1.21	95.77 +/- 4.7
NHP2	52.6 +/- 7.71	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	98.95 +/- 3.65
NKX2-1	51.81 +/- 7.67	99.99 +/- 0.04	99.97 +/- 0.07	98.01 +/- 5.4
NOP10	51.39 +/- 8.82	100.0 +/- 0.0	99.97 +/- 0.18	99.74 +/- 0.75
PARN	55.23 +/- 7.78	100.0 +/- 0.0	99.94 +/- 0.37	99.31 +/- 2.15

Gen	Middelsekventeringsdybde [x]	Andel >= 15x [%]	Andel >= 20x [%]	Andel >= 30x [%]
<i>POT1</i>	55.53 +/- 7.57	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.01	99.62 +/- 1.32
<i>RPA1</i>	54.52 +/- 7.74	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.38 +/- 1.71
<i>RTEL1</i>	52.84 +/- 8.99	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.07	98.89 +/- 3.71
<i>SFTP A1</i>	50.33 +/- 8.36	99.66 +/- 0.47	98.5 +/- 1.81	95.59 +/- 4.76
<i>SFTP A2</i>	53.0 +/- 7.86	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.07	98.32 +/- 5.1
<i>SFTP B</i>	50.07 +/- 8.62	100.0 +/- 0.0	99.96 +/- 0.17	97.73 +/- 5.0
<i>SFTP C</i>	51.46 +/- 8.72	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.06	99.04 +/- 3.84
<i>SLC34A2</i>	51.5 +/- 7.82	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.04	98.82 +/- 3.85
<i>SLC7A7</i>	52.7 +/- 8.37	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.13 +/- 2.96
<i>SMPD1</i>	51.77 +/- 8.45	99.99 +/- 0.05	99.6 +/- 2.02	97.14 +/- 8.99
<i>STING1</i>	48.77 +/- 8.7	100.0 +/- 0.0	99.9 +/- 0.66	97.32 +/- 6.84
<i>STN1</i>	54.12 +/- 8.47	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.04	99.28 +/- 2.46
<i>TERC</i>	59.62 +/- 11.41	100.0 +/- 0.0	99.75 +/- 1.65	98.95 +/- 5.25
<i>TERT</i>	57.28 +/- 9.3	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.04 +/- 2.76
<i>TINF2</i>	51.29 +/- 8.06	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.01	97.99 +/- 6.43
<i>WRAP53</i>	49.42 +/- 8.84	100.0 +/- 0.0	99.84 +/- 1.09	97.08 +/- 7.35
<i>ZCCHC8</i>	53.67 +/- 7.45	100.0 +/- 0.0	99.93 +/- 0.49	99.16 +/- 2.38

For supplerende oplysninger vedrørende analysen kan afdelingen kontaktes på mail: mol-dia@rn.dk. Rapport genereret: 10/10-2025