

Analyse af gener i forbindelse med genomisk tumorprofilerings (WGS)

Panelbeskrivelse

Navn: Analyse af gener i forbindelse med genomisk tumorprofilerings (WGS)

Antal gener: 23

version: 3.1

Ibrugtagningsdato: 2024-05-15

Metodebeskrivelse: Prøveforberedelse og sekventering: Der udføres helgenomsekventering (WGS) med Illumina PCR free library prep (tagmentation) og Illumina sekventering (NovaSeq). Middelsekventeringsdybden for analysen er minimum 30X og minimumsandelens af genomet, der er dækket minimum 15X, er 95 %. Middelsekventeringsdybden og andelen, der i gennemsnit er dækket minimum 15X, for de enkelte gener kan ses i nedenstående tabel.

Dataanalyse: Referencegenom: hg38. Alignment og variantkald foretages med hhv. BWA og GATK. Data analyseres for strukturelle varianter vha. Manta og GATK-gCNV. Der foretages *in silico* filtrering af data til relevante genregioner baseret på nedenstående tabel. Varianter med allelfrekvens mindre end 15% filtreres som udgangspunkt fra. For de anførte gener undersøges der for varianter i de proteinkodende regioner og de nærmeste 10 bp i de tilstødende ikke-proteinkodende regioner, samt varianter i ikke-proteinkodende regioner indberettet som sandsynlig patogene (C4) eller patogene (C5) i ClinVar. Varianter klassificeres iht. ACMGs klassifikationsguideline (PMID: 25741868), og hvis tilgængelig og relevant benyttes ClinGens genspecifikke guideline. Varianter af ukendt klinisk betydning (C3) anføres kun i svaret, hvis de vurderes relevante i forhold til sygdomsbilledet. Anlægsbærerstatus for recessiv sygdom rapporteres ikke nødvendigvis. Genomsekventering er en screeningsmetode, og ikke alle varianter kan med sikkerhed identificeres. Den udførte analyse har ikke samme sensitivitet som DNA-microarrayanalyse ift. strukturelle varianter.

Genliste

Gener, hvor middelsekventeringsdybden er < 30X, er markeret med¹. Gener, hvor andelen af de kodede regioner, der dækket minimum 15X, er < 95 % er markeret med². Gener, der derudover vides at være suboptimalt dækket, er markeret med³. Værdier er angivet med +/- standardafvigelse.

Gen	Middelsekventeringsdybde [x]	Andel >= 15x [%]	Andel >= 20x [%]	Andel >= 30x [%]
ANKRD26	54.38 +/- 7.47	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.09	99.35 +/- 1.43
ATM	55.4 +/- 7.19	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.03	99.49 +/- 0.98
BRCA1	53.95 +/- 7.74	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.03	99.32 +/- 1.65
BRCA2	55.39 +/- 7.18	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.01	99.5 +/- 1.2
CEBPA	45.69 +/- 7.83	99.99 +/- 0.04	98.86 +/- 3.5	90.9 +/- 13.76
DDX41	51.55 +/- 8.76	100.0 +/- 0.0	99.84 +/- 1.1	97.68 +/- 7.9
ETV6	49.86 +/- 7.84	100.0 +/- 0.0	99.8 +/- 0.82	96.6 +/- 4.99
GATA3	52.14 +/- 8.08	100.0 +/- 0.0	99.91 +/- 0.47	97.78 +/- 4.33
MBD4	54.73 +/- 8.13	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.5 +/- 1.1
MLH1	53.24 +/- 7.85	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.09	99.25 +/- 2.39
MLH3	54.57 +/- 7.77	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.57 +/- 0.8
MSH2	54.71 +/- 6.86	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.49 +/- 1.08
MSH3	53.76 +/- 7.32	99.97 +/- 0.11	99.77 +/- 0.49	98.09 +/- 2.45
MSH6	53.68 +/- 7.47	100.0 +/- 0.0	99.87 +/- 0.64	98.86 +/- 2.8
PALB2	53.71 +/- 7.7	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.03	98.7 +/- 2.37
PMS1	54.54 +/- 7.22	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.7 +/- 0.79
PMS2 ^{2,3}	35.23 +/- 6.16	80.13 +/- 8.96	68.26 +/- 7.61	59.9 +/- 8.02
RAD51C	54.82 +/- 7.55	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.58 +/- 1.43
RAD51D	53.22 +/- 8.05	100.0 +/- 0.01	99.97 +/- 0.09	98.92 +/- 2.97
RUNX1	52.97 +/- 7.46	99.99 +/- 0.05	99.8 +/- 0.75	98.13 +/- 3.64

Gen	Middelsekventeringsdybde [x]	Andel >= 15x [%]	Andel >= 20x [%]	Andel >= 30x [%]
TERC	59.62 +/- 11.41	100.0 +/- 0.0	99.75 +/- 1.65	98.95 +/- 5.25
TERT	57.28 +/- 9.3	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.04 +/- 2.76
TP53	50.94 +/- 8.18	100.0 +/- 0.0	99.94 +/- 0.43	98.55 +/- 3.71

For supplerende oplysninger vedrørende analysen kan afdelingen kontaktes på mail: mol-dia@rn.dk. Rapport genereret: 09/10-2025