

VEJLEDNING: Prøvetagning af urin til misbrugsanalyser

VIGTIGT: Der er vakuum i prøverøret - proppen må ikke tages af dette

1. Urinladning i bæger (patienten):



Skru låget af i retning mod uret



Lad urinen i bægeret



Skru låget på i retning med uret

2. Overførelse af urin fra bæger til prøverør (ansvarlig for prøvetagning):



Løft delvist beskyttelsesetiketten



Pres prøverøret (9 mL) ned over studsens og røret fyldes automatisk



Genanbring beskyttelsesetiketten. Bortskaf bægeret + urin

HUSK: Prøverøret skal mærkes med CPR NR

- Patienten bør vaske hænderne inden prøvetagningen.
- Prøvetageren bør arbejde med handsker og det bør sikres at prøverør og bæger ikke kontamineres. Arbejd kun med én prøve ad gangen og pas på krydskontaminering.
- Fyld ikke prøverør med urin der har været i kontakt med hurtigttests/stix.
- Bægeret kan ikke fremsendes, men der kan fyldes flere rør fra samme bæger, hvis det ønskes.